

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Кристи»

107023, г. Москва, ул. Электrozаводская, д. 21, этаж 3, помещение СХІХ, ком. 205
ОГРН: 1107746392511, ОКПО: 66368948, ИНН/КПП: 7718806520 / 771801001, +7(495) 517-40-22
kristident@mail.ru; www.kristident.ru

Банковские реквизиты: р/с № 40702810438000111843 в ПАО Сбербанк
г.Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225

Технический паспорт

на Шапочку медицинскую "Шарлотта" из нетканых материалов одноразовая, нестерильная
KRISTIDENT Medical Products по ТУ 32.50.50-001-66368948-2024

Шапочка медицинская "Шарлотта" из нетканых материалов одноразовая, нестерильная

KRISTIDENT Medical Products предназначена для защиты головы медперсонала и пациентов от попадания микроорганизмов, биологических жидкостей и макрочастиц при проведении хирургических и лечебно-профилактических процедур в медицинских учреждениях.

Варианты исполнения:

1. Размер: 48 см (19")
- Цвет: белый, голубой, черный - 100 шт./уп.
2. Размер: 53 см (21")
- Цвет: белый, голубой, черный - 100 шт./уп.
3. Размер: 58 см (23")
- Цвет: белый, голубой, черный - 100 шт./уп.



Характеристики:

- Материал:
 - Спанбонд (100% полипропилен), 12 ±2 г/м²
 - Резинка - нить латексная, оплетенная полиэфиром.
- Цвета: белый, голубой, черный
- Размер: 48см (19"), 53см (21"), 58см (23")
- Упаковка: 100 штук в п/э пакете с этикеткой
- Транспортная коробка: 10 упаковок по 100 шт.
- Размер транспортной коробки (дл. x шир. x выс.): 49 x 25 x 38,5 см.
- Вес коробки (брутто) для разных размеров:
 - 48 см (19") - 3,4кг.
 - 53 см (21") - 3,7кг.
 - 58 см (23") - 3,9кг.
- Гарантийный срок хранения – 3 года с даты изготовления.



Описание:

Шапочка в готовом виде представляет собой гофрированную ленту, изготовленная из полипропиленового спанбонда плотностью 12 г/м² и резинки (нить латекс, оплетенная полиэфиром).

Способ скрепления деталей шапочки - ультразвуковая прерывистая шовная сварка

Область применения:

Лечебные и лечебно-профилактические медицинские учреждения.

Способ применения

1. Вскройте упаковку и извлеките шапочку.
2. Проверьте целостность изделия.
3. Расправьте складки и наденьте шапочку на голову, чтобы волосы были полностью покрыты шапочкой.
4. Сразу после использования поместите шапочку в емкость для отходов соответствующего класса Б по СанПиН 2.1.3684.

- ТУ 32.50.50-001-66368948-2024
- Регистрационное удостоверение РЗН 2025/24526 от 27.01.2025г.
- ОКПД2 - 32.50.50.190
- Код вида МИ -182410
- Производитель: ООО «Кристи», Россия, 107023, ул. Электrozаводская, д.21, эт. 3, помещ. СХІХ, ком. 205



Генеральный директор
ООО «Кристи»

Мнацаканян А.М.