

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Кристи»

107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21, этаж 3, помещение СХІХ, ком. 205
ОГРН: 1107746392511, ОКПО: 66368948, ИНН/КПП: 7718806520 / 771801001, +7(495) 517-40-22
kristident@mail.ru www.kristident.ru

Банковские реквизиты: р/с № 40702810701150000255 в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)»,
г. Москва, к/с № 30101810145250000411, БИК 044525411

Технический паспорт

на экран защитный для лица, многоразовый «КРИСТИДЕНТ»

Экран защитный для лица «КРИСТИДЕНТ», многоразовый предназначен для защиты лица медицинского персонала от воздействия прямого или частично бокового попадания брызг жидкостей и пыли при использовании в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии.

Варианты исполнения:

- Экран защитный «Классик»:
 - 1 оправа + 5 щитков для лица + упаковка (коробка) - 1 шт.
- Экран защитный «Премиум»:
 - 1 оправа + 5 щитков для лица + 5 щитков для глаз + упаковка (коробка) - 1 шт.
- Экран защитный для лица «Классик специальный»
 - Зажим-крепление (клипон): 2 шт.
 - Щиток защитный для лица: 5 шт.
 - Упаковка (коробка): 1 шт.
- Цвета оправ: белый, черный, прозрачный, голубой, зеленый, желтый, розовый
- Расходные комплекты щитков для экранов:

- 5 щитков для лица



- 5 щитков для глаз



• Инструкция по сборке:

(вариант исполнения «Классик», «Премиум»)

Снимите защитную пленку с двух сторон щитка для лица типа О или щитка для глаз защитного экрана. Возьмите прозрачный щиток экрана и закрепите его зажимами на заушине оправы, сначала одну сторону, затем другую.

При необходимости отрегулируйте высоту и наклон щитка экрана.

• Срок годности: 5 лет

- Экран защитный для лица многоразовый «КРИСТИДЕНТ» по ТУ 9464-006-66368948-2016
- Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/6234 от 08.09.2017г.
- Код ОКВЕД-2: **32.50.11.000**
- Производитель: ООО «Кристи», 107023, Москва, ул. Электрозаводская, д. 21



Генеральный директор
ООО «Кристи»



Мнацаканян А.М.