

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

## «Кристи»

107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21, этаж 3, помещение СХИХ, ком. 205  
ОГРН: 1107746392511, ОКПО: 66368948, ИНН/КПП: 7718806520 / 771801001, +7(495) 517-40-22  
kristident@mail.ru www.kristident.ru

Банковские реквизиты: р/с № 40702810701150000255 в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)»,  
г. Москва, к/с № 30101810145250000411, БИК 044525411

### Технический паспорт

на экран защитный для лица, многоразовый «КРИСТИДЕНТ»

Экран защитный для лица «КРИСТИДЕНТ», многоразовый предназначен для защиты лица медицинского персонала от воздействия прямого или частично бокового попадания брызг жидкостей и пыли при использовании в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии.

#### Варианты исполнения:

- Экран защитный «Классик»:  
- 1 оправа + 5 щитков для лица + упаковка (коробка) - 1 шт.
- Экран защитный «Премиум»:  
- 1 оправа + 5 щитков для лица + 5 щитков для глаз + упаковка (коробка) - 1 шт.
- Экран защитный для лица «Классик специальный»  
- Зажим-крепление (клипон): 2 шт.  
- Щиток защитный для лица: 5 шт.  
- Упаковка (коробка): 1 шт.

- Цвета оправ: белый, черный, голубой, салатный, желтый, розовый
- Расходные комплекты щитков для экранов:

- 5 щитков для лица



- 5 щитков для глаз



- Инструкция по сборке:

(вариант исполнения «Классик», «Премиум»)

Снимите защитную пленку с двух сторон щитка для лица типа О или щитка для глаз защитного экрана. Возьмите прозрачный щиток экрана и закрепите его зажимами на заушине оправы, сначала одну сторону, затем другую.

При необходимости отрегулируйте высоту и наклон щитка экрана.

- Срок годности: 5 лет

- Экран защитный для лица многоразовый «КРИСТИДЕНТ» по ТУ 9464-006-66368948-2016
- Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/6234 от 08.09.2017г.
- Код ОКВЕД-2: 32.50.11.000
- Производитель: ООО «Кристи», 107023, Москва, ул. Электрозаводская, д. 21



Генеральный директор  
ООО «Кристи»



Мнацаканян А.М.