

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Кристи»

107023, г. Москва, ул. Электrozаводская, д. 21, этаж 3, помещение СХІХ, ком. 205
ОГРН: 1107746392511, ОКПО: 66368948, ИНН/КПП: 7718806520 / 771801001, +7(495) 517-40-22
kristident@mail.ru www.kristident.ru


Банковские реквизиты: р/с № 40702810701150000255 в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)», г. Москва, к/с № 30101810145250000411, БИК 044525411

Технический паспорт

на слюноотсос стоматологический одноразовый, комбинированный «КРИСТИДЕНТ»

Слюноотсос стоматологический одноразовый, комбинированный «КРИСТИДЕНТ» (наконечник аспирационный комбинированный, одноразовый) предназначен для всасывания (аспирации) из ротовой полости пациента аэрозолей и твердых частиц, находящиеся в жидкости во взвешенном состоянии при проведении стоматологических процедур, с целью удаления ограниченного объема жидкости (слюны) и взвеси изо рта пациента.

- **Длина:** 148 мм
- **Цвета:** белый, голубой, зеленый, желтый, розовый
- **Диаметр:** 11 мм
- **Упаковка:** 100 шт. в п/э пакете
- **Транспортная коробка:** 20 упаковок

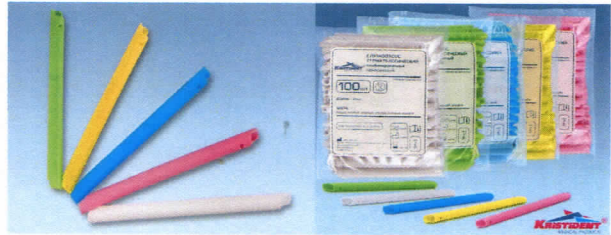

- **Область применения:** применяются в стоматологических лечебно-профилактических учреждениях

Инструкция по применению:

1. Соедините трубку с помощью переходника с внутренним диаметром 11 мм к аспирационной системе стоматологической установки.
2. Поместите слюноотсос в ротовую полость для работы.
3. Для регулировки мощности всасывания слюноотсос вставляют в ротовую полость или концом с боковым отверстием или концом без бокового отверстия.

Врач сам должен определить с какой стороны использовать наконечник слюноотсоса.

- **Срок годности:** 5 лет.
- **Изделия медицинские одноразовые для индивидуальной защиты пациента по** ТУ 9398-001-66368948-2015
- **ОКП:** 939800
- Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4053 от 11.05.2016г.
- **Производитель:** ООО «Кристи», Россия, 107023, ул. Электrozаводская, д.21.

Генеральный директор
ООО «Кристи»



Мнацакян А.М.