

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

## «Кристи»

107023, г. Москва, ул. Электrozаводская, д. 21, этаж 3, помещение СХІХ, ком. 205  
ОГРН: 1107746392511, ОКПО: 66368948, ИНН/КПП: 7718806520 / 771801001, +7(495) 517-40-22  
**kristident@mail.ru www.kristident.ru**

Банковские реквизиты: р/с № 40702810701150000255 в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)»,  
г. Москва, к/с № 30101810145250000411, БИК 044525411

### Технический паспорт

на слюноотсос стоматологический одноразовый «КРИСТИДЕНТ»  
(со съёмным наконечником)

Слюноотсос стоматологический одноразовый, комбинированный «КРИСТИДЕНТ» (наконечник аспирационный комбинированный, одноразовый) предназначен для всасывания (аспирации) из ротовой полости пациента аэрозолей и твердых частиц, находящиеся в жидкости во взвешенном состоянии при проведении стоматологических процедур, с целью удаления ограниченного объема жидкости (слюны) и взвеси изо рта пациента.

- Вид: Со съёмным наконечником
- Длина: 150 мм
- Цвета: бесцветный, голубой, зеленый,
- Диаметр: 6,5 мм
- Упаковка: 100 шт. в п/э пакете
- Транспортная коробка: 30 или 50 упаковок



- Область применения: применяются в стоматологических лечебно-профилактических учреждениях

#### Инструкция по применению:

1. Согните трубку под необходимым углом
2. Соедините слюноотсос стороной без наконечника к аспирационной системе стоматологической установки.
3. Поместите слюноотсос стороной наконечника в ротовую полость пациента для работы.
4. Для подключения аспирационных наконечников к трубкам аспирационной системы стоматологической установки с диаметром 6,5 мм необходимо отдельно приобрести переходник «Мини»: для аспирационных наконечников с  $d = 6,5$  мм или аналогичный переходник от другого производителя.

- Срок годности: 5 лет.
- Изделия медицинские одноразовые для индивидуальной защиты пациента по ТУ 9398-001-66368948-2015
- ОКП: 939800
- Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4053 от 11.05.2016г.
- Производитель: ООО «Кристи», Россия, 107023, ул. Электrozаводская, д.21.

Генеральный директор  
ООО «Кристи»



Мнацаканян А.М.