



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Кристи»

107023, г. Москва, ул. Электrozаводская, д. 21, этаж 3, помещение СХІХ, ком. 205
ОГРН: 1107746392511, ОКПО: 66368948, ИНН/КПП: 7718806520 / 771801001, +7(495) 517-40-22
kristident@mail.ru www.kristident.ru

Банковские реквизиты: р/с № 40702810701150000255 в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)»,
г. Москва, к/с № 30101810145250000411, БИК 044525411

Технический паспорт

на слюноотсос стоматологический одноразовый «КРИСТИДЕНТ»
(со съёмным наконечником)

Слюноотсос стоматологический одноразовый «КРИСТИДЕНТ» со съёмным наконечником предназначен для всасывания (аспирации) из ротовой полости пациента аэрозолей и твердых частиц, находящиеся в жидкости во взвешенном состоянии при проведении стоматологических процедур, с целью удаления ограниченного объема жидкости (слюны) и взвеси изо рта пациента.

- Вид: Со съёмным наконечником
- Длина: 148 ± 2 мм
- Цвета: бесцветный, голубой, синий, зеленый, желтый, фиолетовый, бордовый
- Диаметр: $6,5 \pm 0,3$ мм
- Упаковка: 100 шт. в п/э пакете
- Транспортная коробка: 30 упаковок



- Область применения: применяются в стоматологических лечебно-профилактических учреждениях

Инструкция по применению:

1. Согните трубку под необходимым углом
2. Соедините слюноотсос стороной без наконечника к аспирационной системе стоматологической установки.
3. Поместите слюноотсос стороной наконечника в ротовую полость пациента для работы.
4. Для подключения аспирационных наконечников к трубкам аспирационной системы стоматологической установки с диаметром 6,5 мм необходимо отдельно приобрести переходник «Мини»: для аспирационных наконечников с $d = 6,5$ мм или аналогичный переходник от другого производителя.

- Срок годности: 5 лет.
- Изделия медицинские одноразовые для индивидуальной защиты пациента по ТУ 32.50.13-001-66368948-2021
- ОКП: 32.50.13.110
- Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4053 от 15.08.2022г.
- Производитель: ООО «Кристи», Россия, 107023, ул. Электrozаводская, д.21.

Генеральный директор
ООО «Кристи»



Мнацаканян А.М.